

機械器具 65 歯科用充填器

一般医療機器 歯科用マトリックスバンド (16195000)

バイオクリアー マトリクス前歯用


再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

<形状>

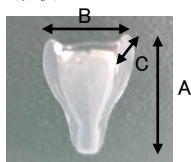

種類	適応部位	本品の 歯頸部 湾曲の幅	形状	寸法(mm)			
				A	B	C	厚さ
A101	上顎近心 	0.5mm		17	10	2	0.05
A102	上顎遠心 	0.5mm		18	8	2	0.05
A103	下顎前歯 	0.5mm		15	7	2	0.05
A104	犬歯近心 	0.3mm		10	11	3	0.05
A105	犬歯遠心 	0.5mm		10	11	4	0.05
DC201	歯間離開 上顎近心 	1mm		19	11	3	0.05
DC202	歯間離開 上顎遠心 	1mm		19	8	2	0.05
DC203	歯間離開 下顎前歯 	1mm		16	6	2	0.05
DC204	歯間離開 上顎近心L 	2mm		16	9	3	0.05

材質:ポリエステル

<原理>

歯間隣接部に本品を装着して隔壁となることにより、修復材が適切な形になるように一般的輪郭を付ける。

**【使用目的又は効果】**

形成・修復時に隣接する歯を保護し、修復する歯に充填する修復材が適切な形になるように一般的輪郭を付けるために用いる。

**【使用方法等】**

<本品を装着する時>

- ①本品の種類を選択します。
- ②必要に応じて、あらかじめ歯科用研削器材にて修復する歯牙の歯間部隣接の接触面を研削・研磨を行います。
- ③本品の歯肉側辺縁部を、歯間乳頭の形状に合わせて、ハサミでカットします。
- ④カットした本品を歯間部および歯肉溝内に挿入し、適合させます。  
※本品を挿入することができない場合は、本品を取り外し、接触面を研削して下さい。
- ⑤必要に応じて、歯科用マトリクスウェッジ[別売:バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ]の種類を選択し、ウェッジのグリップ部を把持し、歯間部に徐々に挿入します。ウェッジが解放され、歯間乳頭が被われていることを確認して、本品をしっかりと安定させます。

<本品を取り外す時>

- ①歯科用マトリクスウェッジ[別売:バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ]のグリップ部を把持し、引き抜きます。
- ②本品を親指と人差し指でつまむか歯科治療用ピンセットを用いて外します。

**【使用上の注意】**

1) 使用注意

- ①本品を使用の際は、必ず口腔内にラバーダムを装着してから使用すること。
- ②別売品を併用する場合は、其々の添付文書もあわせて熟読すること。

2) 重要な基本的注意

- ①誤飲には十分注意すること。
- ②本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ③本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止すること。
- ④本品は再使用しないこと。
- ⑤歯肉および口腔内に痛みや傷又は腫れがある場合には、使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

【保管方法】

- 1) 本品は直射日光、高温多湿を避け、室温にて保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社モリムラ  
 電話番号 03-5808-9350  
 製造業者 Bioclear Matrix Systems By Dr.David Clark,LLC  
 (バイオクリアー マトリクス システムズ バイ  
 ドクター デイビッド クラーク エルエルシー社)  
 製造国 アメリカ合衆国