

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ (16370000)


バイオクリアー ダイヤモンドウェッジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

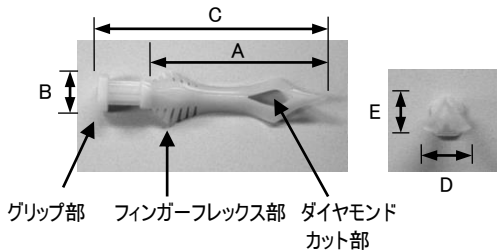

種類	形状	寸法(mm)				
		A	B	C	D	E
S ピンク		12.0	3.6	16.7	1.6	1.3
M オレンジ		13.5	3.6	17.0	2.2	1.5
L イエロー		14.0	3.7	17.3	3.4	2.0
XL ブルー		14.1	3.7	17.5	4.2	2.1
ディープ カリエス グリーン		14.2	3.7	17.7	3.2	1.9

材質:アセタール樹脂

当該製品は、組み合わせによって同梱されない製品があり、同梱されている製品のリストについては直接の被包に記載。

<原理>

本品を歯頸部に設置した際に、本体の弾性力により歯を分離させる。

【使用目的又は効果】

本品は充填物の挿入時に歯をわずかに分離させるために歯頸部に設置する。

【使用方法等】

<装着する時>

1. 歯科用マトリックスバンドを歯間部に挿入します。
2. 本品のグリップ部を把持し、歯間部に徐々に挿入します。本品が解放され、歯間乳頭が被われていることを確認して、しっかりと安定させます。
3. 必要に応じて、歯科用マトリックスリテイナを装着します。

<取り外す時>

1. 本品のグリップ部を把持し、引き抜きます。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ① 本品を使用の際は、必ず口腔内にラバーダムを装着してから使用すること。

2) 重要な基本的注意

- ① 誤飲には十分注意すること。
- ② 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ③ 本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。
- ④ 再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 直射日光、高温多湿、火気を避け、10～24℃にて保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ

電話番号 03-5808-9350

製造業者 Bioclear Matrix Systems By Dr.David Clark,LLC

(バイオクリアー マトリックス システムズ バイ

ドクター デイビッド クラーク エルエルシー社)

製造国 アメリカ合衆国