

バイオクリアー染色液

使用説明書



バイオクリアー染色液は、プラークの付着の程度を容易に識別することができる紫色水溶液です。プラーク付着後 24 時間以上経過した古いバイオフィームは紫色に、新しいバイオフィームはピンク色に染まります。

使用目的(適用)

- バイオフィームの確認
- 亀裂の確認

成分

水、着色料(食用赤色 104 号、食用青色 1 号)、その他

【使用方法】

- ① 歯面を十分に乾燥させます。
- ② ミキシングウェル等に本品を滴下し、アプリケーターに染み込ませ、歯面に塗布します。
- ③ 水洗します。古いバイオフィーム(付着後 24 時間以上経過)は紫色に、新しいバイオフィームはピンク色に染まります。
- ④ 歯面清掃して、染まったバイオフィームを除去します。

【使用上の注意】

- ① 本書に記載の使用目的以外には使用しないで下さい。
- ② 歯科医療有資格以外は使用しないこと。
- ③ 誤飲には十分注意すること。
- ④ 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ⑤ 本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止すること。
- ⑥ 本品と皮膚、目、衣類等への接触を防ぐため、保護グローブ、保護メガネを使用してください。
- ⑦ 本品を目に入れたり、皮膚に付着させないように注意してください。本品を目に入った場合は、15 分流水下で目を洗い、眼科医の診断を受けてください。目に入った場合、目の赤みや刺激を引き起します。皮膚に付着した場合は、食用酢を使用して除去して下さい。皮膚に付着した場合は、皮膚の変色や刺激を引き起します。
ユニット等に垂らしてしまった場合は、ペーパータオルにて拭き取ります。万が一、色が付着している場合には、漂白剤や食用酢を使用して除去します。

【保管方法】

本品の容器を蓋をきつく密閉し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社モリムラ

住所 東京都台東区三ノ輪 1-28-10-3F

電話番号 03-5808-9350

製造業者 Bioclear Matrix Systems By Dr.David Clark,LLC(バイオクリアー マトリックス システムズ バイ ドクター デイビッド クラーク エルエルシー社)

製造国 アメリカ合衆国