

コンタックEZ 修復用ストリップ



5 個入

- コンタックEZ 修復用ストリップ アソート 5個入
内容:ブラック・オレンジ・ホワイト・ブルー・グレー 各1個入
- コンタックEZ 修復用ストリップ ブラック 5個入
- コンタックEZ 修復用ストリップ オレンジ 5個入
- コンタックEZ 修復用ストリップ ホワイト 5個入
- コンタックEZ 修復用ストリップ ブルー 5個入
- コンタックEZ 修復用ストリップ グレー 5個入

歯科医院様参考価格 **¥ 4,500**

コンタックEZ
ストリッブトレイ



1個入

歯科医院様参考価格 **¥ 1,500**

コンタックEZ サブジンジバルストリップ



5 個入

- サブジンジバルストリップ アソート 5個入
内容:ブルーナロー×2個、ゴールドナロー×2個、カッパーナロー×1個入
- サブジンジバルストリップ ブルーナロー 5個入
- サブジンジバルストリップ ゴールドナロー 5個入
- サブジンジバルストリップ カッパーナロー 5個入

歯科医院様参考価格 **¥ 4,500**

コンタックEZ IPR用ストリップ



8個入

- コンタックEZ IPR用ストリップ アソート 8個入
内容:イエロー・レッド・ダークブルー・グリーン 4種類×各2個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ イエロー 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ レッド 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ ダークブルー 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ グリーン 8個入

- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド)アソート 8個入
内容:クリア・シアン・パープル・ブラウン 4種類×各2個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド)クリア 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド)シアン 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド)パープル 8個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド)ブラウン 8個入

歯科医院様参考価格 **¥ 7,800**

コンタックEZゲージ
1セット6種類入

0.10mm、0.20mm、0.25mm、
0.30mm、0.40mm、0.50mm

歯科医院様参考価格 **¥ 6,800**

32個入(8個入×4パック入)

- コンタックEZ IPR用ストリップ アソート 32個入
内容:イエロー・レッド・ダークブルー・グリーン (4種類×各2個入)×4パック入
- コンタックEZ IPR用ストリップ イエロー 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ レッド 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ ダークブルー 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ グリーン 32個入

- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド)アソート 32個入
内容:クリア・シアン・パープル・ブラウン (4種類×各2個入)×4パック入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド)クリア 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド)シアン 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド)パープル 32個入
- コンタックEZ IPR用ストリップ (ワイド)ブラウン 32個入

歯科医院様参考価格 **¥ 29,800**

コンタックEZ ハイジニストストリップ・ステインリムーバー



5 個入

- コンタックEZ ハイジニストストリップ・ステインリムーバー5個入

歯科医院様参考価格 **¥ 4,500**

本紙に掲載されている価格は2021年1月のもの(税抜)です。
形態・仕様は予告なく変更することがあります。

一般医療機器 歯科研削用ストリップ 医療機器届出番号:13B2X10359130001
製造業者:ContacEZ,LLC(コンタックEZ エルエルシー社) 製造国:アメリカ合衆国

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は

20210118.1000

CONTAC EZ[®]
Interproximal Solutions

歯科研削用ストリップ

コンタックEZ

イーズ

修復用ストリップ

- ・間接修復物のセット時の研磨に
- ・コンポジットレジン修復時の研磨に
- ・接着材、余剰セメントの除去に



サブジンジバル
ストリップ

- ・オーバーハングの除去に
- ・間接修復物周囲の余剰セメントの除去に




IPR用
ストリップ

- ・インビザラインなどのマウスピース
矯正時のエナメル質歯間隣接面
の研削に



ハイジニスト
ストリップ
ステインリムーバー

- ・歯間隣接面のステインの除去に

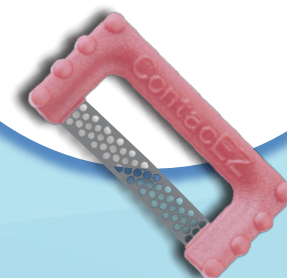

コンタックEZ

イース

片手でラクラク！操作可能！

- ▶ 片手で操作ができ、適切なコントロールが可能で、手の疲労感を減少させます。
- ▶ 柔軟なストリップのため、自然な歯の外形に適合させることができます。
- ▶ オートクレーブ滅菌（132℃、10分間）および再使用（目安：3～5回）が可能です。

コンタックEZ ストリッptray


コンタックEZ ストリップ各種を
8個収納して滅菌が可能です。



コンタックEZ

イース

修復用ストリップ

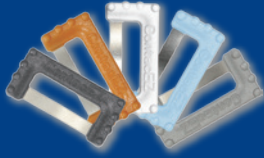

種類	ブラック	オレンジ	ホワイト	ブルー	グレー
外観					
ブレード厚さ	0.06mm	0.05mm	0.035mm	0.065mm	0.05mm
ダイヤモンド粒子	片面25μm	片面22μm	なし	なし	片面22μm
鋸歯	鋸歯なし	上下鋸歯付	上下鋸歯付	上下鋸歯付	鋸歯なし
用途	●最終セメンテーション前の間接修復物の形態修正。 ●コンポジットレジン修復後の隣接面の形態修正。 ※オレンジは、歯間部にブラックを挿入できない場合に使用します。		●間接修復物のセメンテーション後の歯間部の余剰セメント等の除去・清掃用。 ●光重合前のベニアまたはコンポジットレジン重合後の歯間部の清掃用。 ※ブルーは、多量のセメントが残留している場合に使用します。		●修復物の最終研磨用。

コンタックEZ

イース

サブジンジバルストリップ



種類	ブルーナロー	ゴールドナロー	カッパーナロー
外観	CUT	TRIM	POLISH
ブレード厚さ	0.07mm	0.10mm	0.06mm
ストリップ幅	2.5mm	2.5mm	2.5mm
ダイヤモンド粒子	なし	片面42μm	片面25μm
鋸歯	上下鋸歯付	鋸歯なし	鋸歯なし
用途	●コンポジットレジン修復時の大きなオーバーハングの除去等を使用します。 ●薄い鋸歯付ストリップのため、容易に歯肉縁下にアクセスでき、穏やかに頬舌側方向に動かし、余剰のコンポジットレジンおよびクラウン周囲のセメントを切り離します。	●厚いダイヤモンドストリップの中央部から歯間部にスムーズに挿入でき、左右のダイヤモンド研削面を用いて、迅速に小さなコンポジットレジンオーバーハングの調整および間接修復物周囲の余剰セメントを除去します。 ●コンポジット充填時の、より良い接着のために、歯肉縁下の窩洞形成周辺のバイオフィルムの除去にも使用可能です。	●オーバーハングの除去後の修復物の清掃研磨に使用します。 ●エキストラファインダイヤモンド粒子は、1ステップで簡単に健康的で自然な歯の外形に最終研磨をすることができます。

コンタックEZ

イース

IPR用ストリップ (Interproximal Reduction)



コンタックEZ IPR (Interproximal Reduction) 用ストリップは、エナメル質歯間隣接面ストリッピング用の研削用ストリップです。

コンタックEZゲージ



歯間隣接面間を測定するためのゲージです。
コンタックEZゲージを用いて、エナメル質の切削量の必要な厚みを確認してください。

1セット6種類入
0.10mm、0.20mm、0.25mm、
0.30mm、0.40mm、0.50mm



IPR用ストリップ

種類	イエロー	レッド	ダークブルー	グリーン
外観				
ブレード厚さ	0.07mm	0.12mm	0.15mm	0.20mm
ダイヤモンド粒子	片面22μm	両面32μm	両面45μm	両面45μm
鋸歯	上下鋸歯付	鋸歯なし	鋸歯なし	鋸歯なし

IPR用ストリップ(ワイド)


種類	クリア	シアン	パープル	ブラウン
外観				
ブレード厚さ	0.10mm	0.15mm	0.25mm	0.30mm
ダイヤモンド粒子	片面32μm	片面45μm	両面45μm	両面45μm
鋸歯	上下鋸歯付	鋸歯なし	鋸歯なし	鋸歯なし

コンタックEZ

イース

ハイジニストストリップ ステインリムーバー

コンタックEZ ハイジニストストリップ・ステインリムーバーは、薄いブレード厚さの非摩耗性の柔軟なストリップのため、歯質に損傷を与えずに、迅速・簡単に、歯間隣接面から、頑固なコーヒー、お茶、タバコ、赤ワインなどのステインを効率的に除去し、ケアタイムを短縮します。

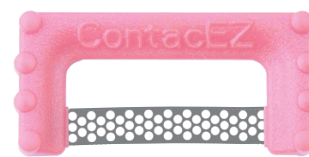

種類	ピンク
ブレード厚さ	0.05mm
ブレードタイプ	多孔性
ダイヤモンド粒子	なし
鋸歯	鋸歯なし

効果的なご使用例

STEP 1

口唇と歯肉の間にロールワッテを配置させるか、手指によって、口唇を作業の妨げにならない位置に移動させ、口唇を保護します。

ステインが付着した隣接面の歯間部に、ストリップを頬舌側方向に穏やかな力で前後に動かしながら挿入します。

STEP 2

柔軟なストリップを、ステインが付着した隣接面に沿わせて、穏やかな力で湾曲させ、ステインを除去するまで、圧力を維持しながら、頬舌側方向に前後にストリップを往復させてください。

STEP 3

必要に応じて、反対側の歯面上でSTEP 2を繰り返してください。

薄い非摩耗性多孔性ストリップは、エナメル質に損傷を与えずに、ステインのみを除去します。